

CRUSPLINT[®]

**Unterschenkel –Walker
mit R.O.M.- Gelenkschienen
abnehmbare Laufsohle**

hergestellt in Deutschland **CE**

Indikationen

**Sprunggelenks-Endoprothesen
Distale Tibia-Umstellungen
Rückfuss aufrichtende Arthrodesen
Mittel-und Vorfuss - Arthrodesen
Achillessehnen-Rupturen**

Merkmale

**rutschfeste Laufsohle, auch für Patienten mit
Greifbehinderung leicht abzunehmen
Extensions - /Flexionseinstellung in
10°-Schritten kein Werkzeug und kein
Abnehmen der Orthese erforderlich .
Atmungsaktiver Innenschuh mit perforiertem
Abstandsgewirk als Fütterung
Zusätzliche 0°-Stabilisierung**



**Art.Nr. 2304
HMV.Nr. 23.06.01.1008**

small	Gr. 35 - 38
medium	Gr. 39 - 42
large	Gr. 43 - 46
x-large	Gr. 47 - 49

**Hegos GmbH ortho.casts Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf
Tel. 08192 – 99733 -70 Fax 08192 – 99733 -77
hegos-medical@t-online.de www.hegos-medical.de**

Die Anpassung des CRUSPLINT® kann ausschließlich durch geschulte Fachkräfte erfolgen.

- Nehmen Sie die Orthese nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ganz oder zeitweise ab!
- Verfrühte Abnahme kann zu schwerwiegenden Wiederholungsverletzungen führen!
- Mit angelegter Orthese keine gewaltsamen Bewegungsversuche provozieren!
- Verändern Sie nicht eigenmächtig die von Ihrem Arzt/Orthopädietechniker vorgegebenen Winkel-Grad-Einstellungen am Gelenk. Dies könnte zur Beeinträchtigung des Heilungsprozesses bzw. zu Wiederholungsverletzungen führen

Beim Auftreten von auffälligen Veränderungen, die Sie auf das Tragen der Orthese zurückführen, suchen Sie bitte Ihren Arzt und/ oder Ihren Orthopädietechniker auf.


Nachdem die Orthese vom Orthopädietechniker eingestellt wurde, geschieht das Abnehmen und Wiederanlegen der Orthese nur noch durch Öffnen der Klettverschlüsse an der Vorderseite. Dadurch bleibt der ursprünglich eingestellte Umfang erhalten.

Bei unsachgemäßer Anwendung und/oder Veränderung am Produkt erlischt die Produkthaftung.

Die seitlichen Schienen der Orthese sind kunststoffbeschichtet und können mit Wasser und Reinigungsmittel gereinigt werden, ebenso das Fussteil und die Laufsohle.


Die Innenpolster bei 30°C Handwäsche. Lufttrocknen

Gebrauchshinweise

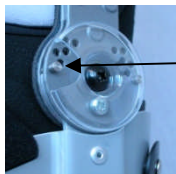

Ihr Orthopädietechniker passt Ihnen nach Anforderung Ihres Arztes die Orthese an und stellt die erforderlichen Bewegungslimitierungen ein (je Bohrung 10°)

Während der anfänglichen 0°-Ruhigstellungs-Phase die Klemmschraube unterhalb der schwarzen Gelenkachse anziehen. Diese stabilisiert das Gelenk. Bei Freigabe des Gelenkes bitte die Klemmschraube wieder öffnen !

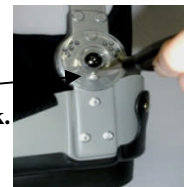

Anlegen der Orthese



Öffnen Sie die vorderen Verschlüsse am Unterschenkel und auf dem Fussrist und steigen Sie in die Orthese ein. Die hinteren Verschlüsse bleiben unverändert. Das Innenpolster mittels der Klettverschlüsse unter leichtem Zug verschließen. Danach die drei schwarzen Gurte über dem Schienbein und die zwei Gurte über dem Fussrist unter Zug verschließen. Das Bein soll fest aber ohne Einschnürungen in der Orthese sitzen.



Die schwarze Laufsohle kann zum Reinigen und nachts abgenommen werden. Zum Öffnen der Druckknopfverschlüsse die Laschen vom grauen Fußteil abziehen. nicht

Bei Greifproblemen können die Druckknöpfe auch mittels eines langen Schuhlöffels o. ä. geöffnet werden. Dazu von oben mit leichtem Druck die Laschen vom Fußteil lösen



Die Laufsohle nach unten abklappen und etwas nach vorn schieben. Dadurch löst sich der Haltesteg des Fußteiles aus dem Schlitz und die Sohle kann abgenommen werden

