

# DEVALGO<sup>®</sup>

## die flexible

Hallux valgus - Korrektur-Bandage

### Anwendungsbereich

zur konservativen und postoperativen  
Behandlung des Hallux valgus  
auch als Nachtschiene geeignet

### Merkmale

Kann aufgrund Ihrer geringen Materialdicke (< 1mm)  
im Normalschuh getragen werden und ermöglicht  
ungehindertes Abrollen durch flexible Konstruktion.  
Auch als Nachtschiene geeignet.

**Korrektur erfolgt nur in Horizontalebene**  
**die Flexion wird nicht eingeschränkt**

### Anlegen der Bandage

- Die graue Fläche der Bandage weist zur Haut. Legen Sie die Bandage idealerweise auf den Boden. Fuss darauf stellen, richtige Position zur Großzehe einrichten
- Mittelfuss-Bandage um den Fussrist legen, und mittels des Klettportes leicht fixieren
- Die Großzehe in gewünschte Korrekturstellung bringen und den Zügel von oben nach unten um die Zehe führen, danach mit dem Klettstreifen verschließen
- breiten Verschluss an der Mittelfuss-Bandage straff nachsetzen

Beim Tragen in Normalschuhen auf fußformgerechtes Schuhwerk achten,  
um die Funktion der Bandage nicht zu beeinträchtigen

hergestellt in Deutschland 



Art.Nr.05500

## Links – Rechts

# **DEVALGO**®

## **Gebrauchsanweisung**

### **Wichtige Patientenhinweise**

Die *devalgo* ist eine korrigierende und stützende Schienen-Bandage, die nach Anweisung Ihres Arztes getragen werden sollte.

Die Bandage ist zur Verwendung für nur einen Patient vorgesehen.

Verwenden Sie vor dem Anlegen der Bandage keine fetthaltigen Salben, da diese auf Dauer die Luftdurchlässigkeit des Materiales beeinträchtigen können.

Bei auffälligen Veränderungen, die Sie auf das Tragen der Bandage zurückführen, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Garantie wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet.

Bei unsachgemäßer Anwendung und/oder bei Veränderungen die am Produkt unsachgemäß vorgenommen werden ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

Eine evtl. Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.

### **Gegenanzeigen + Risiken**

Mit angelegter Orthese keine gewaltsamen Bewegungen provozieren.

Nehmen Sie die Orthese nach operativen Eingriffen nur nach Weisung des behandelnden Arztes ganz oder zeitweise ab.

Unverträglichkeiten und Hautirritationen sind bisher nicht bekannt. Sollten Sie trotzdem Reaktionen oder Veränderungen der Haut feststellen, die Sie auf das Tragen der Bandage zurückführen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

**Waschempfehlung:** Idealerweise Handwäsche bei 30° C  
mit einem Feinwaschmittel / Bürste. Lufttrocknung