

DIGIDRESS®

UNELASTISCHE
Mittelfuß - Zehenbandage

eine Universalgröße für links und rechts anwendbar

hergestellt in Deutschland



Art. Nr. 05100 mit 2 Zehenschlaufen
Art. Nr. 05100-4 mit 4 Zehenschlaufen
CE PZN 0058531

Anwendungsbereiche
Hallux Valgus
Hammerzehen
Dig. superductus
Spreizfußbeschwerden
zur postoperativen Redression

Waschbar bis 30°C. Lufttrocknen!

hegos GmbH Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf
Tel: 08192-99733-70 Fax: 08192-99733-77 e-Mail: hegos-medical@t-online.de
www.hegos-medical.de

- **Mittelfußbandage unter leichtem Zug anlegen, (vorderer Rand liegt kurz hinter dem Großzehen-Ballen) Klettverschluss über dem Fußrist andrücken**
- **Fersengurt medial und lateral unter leichtem Zug auf der Mittelfußbandage ankletten.**
- **Großzehenkappe überstülpen und mittels Klettverschluss die Umfangsgröße einstellen.**
- **Korrekturzügel medial überkreuzen und an Mittelfußbandage ankletten.**
- **Korrekturschlaufen bedarfsweise dig. II bis V überstülpen und plantar ankletten.**

