

# ***FRACTOFIX***

## **Unterschenkel - Fuss- Orthese ohne Gelenk**

hergestellt in Deutschland

### **Indikationen**

**Distale Tibia-Umstellungen-/frakturen  
Rückfussaufrichtende Arthrodesen  
Mittel-und Vorfuss-Arthrodesen  
Osteotomien  
Calcaneusfrakturen  
Achillessehnen-Rupturen  
Mittelfussfrakturen**

### **Merkmale**

**-Fersenkeile 30° + 15° für  
-Achillessehnenruptur  
-atmungsaktiver Innenschuh  
-abnehmbare Laufsohle**



CE

<b>small</b>	<b>Gr. 35 - 38</b>
<b>medium</b>	<b>Gr. 39 - 42</b>
<b>large</b>	<b>Gr. 43 - 46</b>
<b>X-large</b>	<b>Gr. 47 - 49</b>

## Wichtige Patientenhinweise

Die Anpassung des *FRACTOFIX* kann ausschließlich durch geschulte Fachkräfte erfolgen.

→ Nehmen Sie die Orthese nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ganz oder zeitweise ab!

→ Verfrühte Abnahme kann zu schwerwiegenden Wiederholungsverletzungen führen!

→ Mit angelegter Orthese keine gewaltsamen Bewegungsversuche provozieren!

Nachdem die Orthese vom Arzt/Orthopädietechniker eingestellt wurde, geschieht das Abnehmen und Wiederanlegen der Orthese nur noch durch Öffnen der Klettverschlüsse an der Vorderseite. Dadurch bleibt der ursprünglich eingestellte Umfang erhalten. Seitenschienen können nach Bedarf eingeschränkt werden.

Bei unsachgemäßer Anwendung und/oder Veränderung am Produkt erlischt die Produkthaftung.

Die seitlichen Schienen der Orthese sind beschichtet und können mit Wasser und Reinigungsmittel gereinigt werden, ebenso das Fußteil und die Laufsohle.

Beim Auftreten von auffälligen Veränderungen, die Sie auf das Tragen der Orthese zurückführen, suchen Sie bitte Ihren Arzt und/ oder Ihren Orthopädietechniker auf.

---

zur Behandlung der Achillessehnenruptur : Einlegen der Fersenkeile 30° oder 15° zwischen schwarzen Innenschuh und grauer Fußschale Befestigung über selbstklebende Klettverschlüsse an der grauen Fußschale

---

## Hinweise zum Ab-und Anlegen der Orthese



Öffnen Sie die vorderen Verschlüsse am Unterschenkel und über dem Fussrist und steigen Sie in die Orthese ein. Die hinteren Verschlüsse bleiben unverändert. Das Innenpolster mittels der Klettverschlüsse unter leichtem Zug verschließen. Danach die drei schwarzen Gurte über dem Schienbein und die zwei Gurte über dem Fussrist unter Zug verschließen. Das Bein soll fest aber ohne Einschnürungen in der Orthese sitzen. Achten Sie darauf, dass die Ferse hinten an der Schale anliegt.



Die schwarze Laufsohle kann zum Reinigen und nachts abgenommen werden. Zum Öffnen der Druckknopfverschlüsse die Laschen vom grauen Fußteil abziehen. Die Laschen bitte nicht knicken! Bei Greifproblemen können die Druckknöpfe auch mittels eines langen Schuhlöffels o. ä. geöffnet werden. Dazu von oben mit leichtem Druck die Laschen vom Fußteil lösen



Nach Lösen der Druckknöpfe die Laufsohle nach unten abklappen und etwas nach vorn schieben. Dadurch löst sich der Haltesteg des Fußteiles aus dem Schlitz und die Sohle kann abgenommen werden



Die Innenpolster bei 30°C Hand- oder Maschinenwäsche. Lufttrocknen  
Laufsohle mit Wasser und Seife waschen, trockenreiben