

# **GILCHRISAVE**®

**Gilchrist Schulter-Arm-Verband  
Ruhigstellungsbandage**

hergestellt in Deutschland **CE**

## **Anwendungsbereich**

zur Ruhigstellung von Arm  
und Schultergelenk nach  
Trauma oder Operation

## **Merkmale**

Fertigbandage zur individuellen  
Anpassung am Patient.  
Komfortable Veloursoberfläche.  
Links und rechts anzuwenden.  
Zusätzliches Fixierband verhindert  
Abrutschen des Armes im Liegen  
nach hinten.



Art. Nr. 05404  
col. schwarz

HMV. Nr. 23.09.01.0013

## **Größeneinteilung**

gemessen Unterbrustumfang in cm

Small	=	bis 90 cm
Medium	=	90 – 120 cm
Large	=	über 120 cm

hegos GmbH Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf  
Tel: 08192-99733-70 Fax: 08192-99733-77 e-Mail: hegos-medical@t-online.de  
www.hegos-medical.de

HMV-Nr. 23.09.01.1013  
Hergestellt in Deutschland

**Funktion:** Die GILCHRISAVE (Schulter-Arm-Verband) ist eine Fertigbandage, zur Ruhigstellung von Arm und Schulter. Er ist einfach und schnell anzulegen.

**Indikationen:** nach Verletzungen und operativen Eingriffen, zur Ruhigstellung von Schultergelenk und Arm für links und rechts anwendbar



<b>Größe small</b>	<b>Unterbrustumfang bis 90 cm</b>
<b>Größe medium</b>	<b>Unterbrustumfang 90 bis 120</b>
<b>Größe large</b>	<b>Unterbrustumfang über 120</b>

### Anlegen

1. Taillengurt um den Patienten legen. Die beiden Verschlußstreifen unter leichtem Zug verschließen.
2. Tragegurt über die Schulter der unverletzten Seite nach vorne legen und durch die Schlaufe der Unterarmschlinge führen. Den Klettverschluß nach oben ziehen und verschließen.
3. Oberarmmanschette unter leichtem Zug verschließen, so dass die schwarzen Klettstreifen zum Körper zeigen. Dieselben werden am Taillengurt durch leichtes Andrücken befestigt.
4. Wenn der Unterarm die gewünschte Position hat, den Doppelklettstreifen zwischen Taillengurt und Unterarmschlinge anbringen
5. Zur vollständigen Ruhigstellung des Armes, bzw. zum Liegen den beiliegenden Klettstreifen über die Unterarmschlinge spannen und am Taillengurt befestigen.

6. Zum Bewegen des Unterarmes kann der Patient den Verschlußstreifen der Unterarmschlinge öffnen.

**Hegos GmbH ortho.casts Greifenberger Str. 14 86938**

**Tel. 08192 - 99733 -70 Fax 08192 - 99733 -77**  
**[hegos-medical@t-online.de](mailto:hegos-medical@t-online.de) [www.hegos-medical.de](http://www.hegos-medical.de)**

Sc