

GILCHRISSELLE

Immobilisierungssorthese für das Ellbogengelenk



hergestellt in Deutschland

Indikationen

Bursitis, Frakturen,
nach Burssektomie
rezidivierende Epicondylitis
Sulcus ulnaris - Syndrom
temporäre Ruhigstellung nach
Verletzung oder OP

Merkmale

Längen und Winkelgrade
stufenlos einstellbar.
Zirkulärer, abnehmbarer
Schutzbügel für das Gelenk
Eine Universalgröße
links und rechts anwendbar
mit Armtragegurt
herausnehmbares Innenpolster



Artikelnummer 05014

HMV.23.08.01.0004

CE

Materialien

Aussenschalen	Polyäthylen
Polsterung	Baumwolljersey-Polyurethanschaum-Polyamid-Velours-Verbund
Verschlussgurte	Polyamid-Velours mit Klettthaken
Armtragegurt	kaschiertes doppelseitiges Polyamid-Velours mit PU-Schaum-Füllung

Wichtige Patientenhinweise

Bei Hauterkrankungen, entzündlichen Prozessen im Bereich der Bandage, bei Sensibilitätsstörungen sowie bei Herz – oder Atemwegserkrankungen tragen Sie die Bandage nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.


Die verwendeten Materialien sind als nicht allergieauslösend eingestuft und tragen ein Ökotex-Zeichen.

Sollten trotzdem Hautreizungen auftreten, oder Sie bemerken Veränderungen, die Sie auf das Tragen der Bandage zurückführen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt/Orthopädietechniker.

- **GILCHRISSELLE** ist nur zur Versorgung für einen Patient vorgesehen.
- Verwenden Sie die Bandage nur für die angegebenen Anwendungsgebiete
- Unsachgemäße Behandlung kann zum Gewährleistungsverlust führen
- Sollte eine Zunahme der Beschwerden eintreten, die Sie auf das Tragen der **GILCHRISSELLE** zurückführen, wenden Sie sich bitte an den verordnenden Arzt.
- Technische Veränderungen am Produkt führen zum Ausschluß der Produkthaftung.
- Garantiegewährung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
- Die Entsorgung der Bandage kann über den Hausmüll erfolgen
- Textilteile Handwäsche 30°C Klettverschlüsse schließen lufttrocknen

hegos GmbH
Tel: 08192-99733-70

Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf
Fax: 08192-99733-77 e-Mail: hegos-medical@t-online.de
www.hegos-medical.de

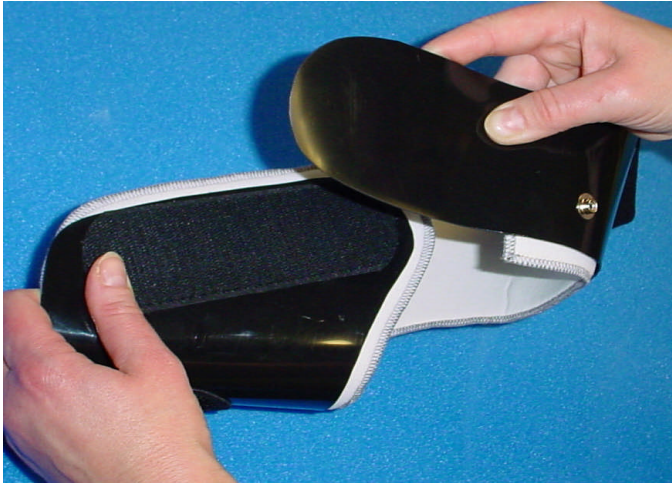

1. Größeneinstellung und Winkeleinstellung von ca. 80° bis 120° mittels der medialen und lateralen Klettverschlüsse

2. Anbringen des Schutzbügels an den Druckknöpfen, auf Armumfang achten Klettverschluss soll vom Körper wegweisend angebracht sein



3. Polsterung kann zum Waschen herausgenommen werden
Waschbar bis 40°C. Kein Trockner



4. Tagsüber kann zur Entlastung der Armtragegurt getragen werden. Längenverstellung mittels Klettverschluss

