

Sangarre

medic ballerina



**Zum Tragen nach operativen
Eingriffen am Vorfuss
mit versteifender Innensohle**

medic ballerina Verbandschuh

CE

Gebrauchsanweisung Wichtige Patientenhinweise

Den Verschluss am Rist unter mässigem Zug schließen so daß der Fuß fest aber schmerzfrei im Schuh gehalten wird.

Die Alu-Innensohle kann vom Arzt ohne Einsatz von Werkzeugen angepasst werden

Der medic ballerina ist ein medizinischer Schuh zur Nachsorge einer chirurgischen Behandlung und der Sicherung der nachfolgenden Therapie, den Sie nach Anweisung Ihres Arztes tragen .

Der Schuh nimmt auch große Verbände auf. Hierzu den umlaufenden Gummisenkel mittels des Druckverschlusses entsprechend einstellen.



Der Schuh ist zur Verwendung für nur einen Patient vorgesehen. Verwenden Sie vor dem Anlegen des Schuhs keine fetthaltigen Salben, da diese auf Dauer die Qualität des Materials beeinträchtigen können. Bei auffälligen Veränderungen, die Sie auf das Tragen des Schuhs zurückführen, suchen Sie bitte Ihren Arzt/ Orthopädietechniker auf. Garantie wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet. Bei unsachgemäßer Anwendung und/oder bei Veränderungen die am Produkt unsachgemäß vorgenommen werden ist eine Produkthaftung ausgeschlossen. Der Schuh ist bis 30° C maschinenwaschenbar. Dazu die Innensohle und den Ristgurt entfernen. Eine evtl. Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.

hegos GmbH Greifenberger Str. 14 86938 Schondorf
Tel: 08192-99733-70 Fax: 08192-99733-77 e-Mail: hegos-medical@t-online.de
www.hegos-medical.de