

TOEFLEX [®]

Hallux-Valgus-Orthese

zum Tragen im Normalschuh und nachts

Anwendungsbereich

zur konservativen und postoperativen Behandlung des Hallux valgus und bei Spreizfußbeschwerden

Merkmale

unelastische Metatarsalbandage mit medial verlaufender Gelenkschiene
Korrektur des Hallux ohne Druckstellen durch anpassbare, gepolsterte Schiene
weiche, retrokapitale Pelotte zur Entlastung der Grundgelenke. Hautfreundliches Material
wahlweise 4 Zehenschlaufen für die Zehen II–V

hergestellt in Deutschland



Art.Nr. 05400 HMV.Nr.23.01.01.0006

Auswahl nach Schuhgrößen	05400LS	links small	35 - 37
	05400LM	links medium	38 - 41
	05400LL	links large	42 - 46
	05400RS	rechts small	35 - 37
	05400RM	rechts medium	38 - 41
	05400RL	rechts large	42 - 46

waschbar 30°C, Klettverschluss schließen, lufttrocknen

TOEFLEX ®

Gebrauchsanweisung
Wichtige Patientenhinweise

Die **TOEFLEX** ist eine korrigierende und stützende Orthesen-Bandage, die nach Anweisung Ihres Arztes getragen werden sollte.

Die Bandage ist zur Verwendung für nur einen Patient vorgesehen.

Verwenden Sie vor dem Anlegen der Bandage keine fetthaltigen Salben, da diese auf Dauer die Luftdurchlässigkeit des Materiales beeinträchtigen können.

Bei auffälligen Veränderungen, die Sie auf das Tragen der Bandage zurückführen, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Garantie wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet.

Bei unsachgemäßer Anwendung und/oder bei Veränderungen die am Produkt unsachgemäß vorgenommen werden ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

Eine evtl. Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.

Gegenanzeigen + Risiken

Nehmen Sie die Orthese nach operativen Eingriffen nur nach Weisung des behandelnden Arztes ganz oder zeitweise ab.

Unverträglichkeiten und Hautirritationen sind bisher nicht bekannt. Sollten Sie trotzdem Reaktionen oder Veränderungen der Haut feststellen, die Sie auf das Tragen der Bandage zurückführen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Waschempfehlung: Idealerweise Handwäsche bei 30° C mit einem Feinwaschmittel / Bürste. Lufttrocknung



Korrektur des Großzehens



und der Kleinzehen mittels 4 Schlaufen



an der Unterseite befestigen